


COVID-19

Szybki test antygenowy


Używaj wszędzie. Testuj każdego.

Jesteś pracodawcą? Odpowiadasz za zdrowie i bezpieczeństwo ludzi oraz funkcjonowanie firmy, zakładu produkcyjnego, szkoły, przychodni, szpitala? Test wykrywający antygeny u osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem Sars-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, pozwala na podjęcie właściwych działań i minimalizowanie ryzyka.

**Nie czekaj. Sprawdź siebie i swoich ludzi.
Pracuj spokojnie.**

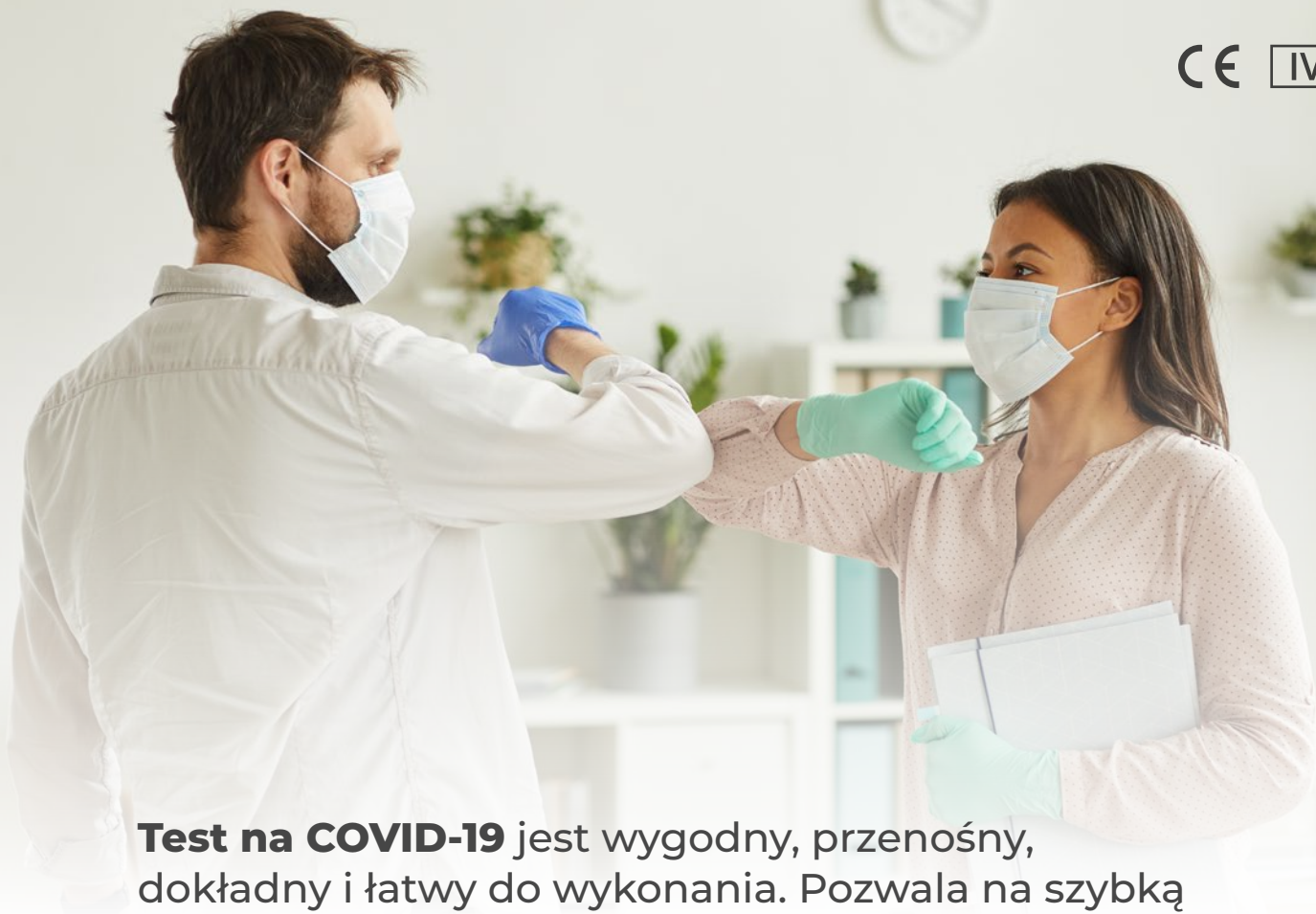

Test na COVID-19 jest wygodny, przenośny, dokładny i łatwy do wykonania. Pozwala na szybką identyfikację osób zakażonych, a także podjęcie profilaktycznych i natychmiastowych działań.

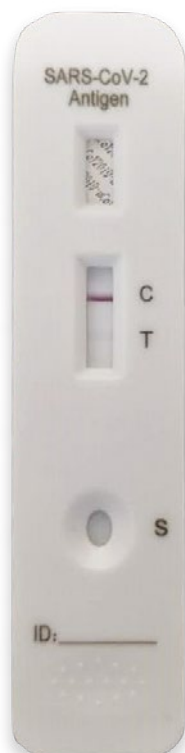

Bardzo dokładny

czułość: 92,5%, swoistość: 99,2% (w porównaniu z PCR)

Bez laboratorium badawczego

Test można wykonać w niemal każdym miejscu (obiekcie, zakładzie, biurze).

Potwierdzony klinicznie

Jest wiarygodny i sprawdzony klinicznie.
Posiada zatwierdzony znak CE.

Działa w oparciu o wymaz

Polega na powierzchniowym pobraniu wymazu z nosa lub z nosogardła lub z jamy ustnej.

Wynik już po 20 minutach!



Krok 1. Pobranie wymazu

Za pomocą jałowej wymazówki (patyczka z wacikiem) wykonaj wymaz jedną z trzech metod: z nosa lub z nosogardła lub z jamy ustnej.



Krok 2. Dodanie ekstraktu

Dodaj 6 kropli ekstraktu R1 do rurki ekstrakcyjnej. Następnie włóż próbkę z wymazem i obracaj wacik przez około 10 sekund, dociskając go do ściany rurki, aby uwolnić antygen w waciku.





Krok 3. Umieszczenie materiału na płytce testowej


Umieść 2 krople otrzymanej, wyekstrahowanej próbki w okrągłym okienku na płytce testowej.

Krok 4. Odczyt wyników


Po upływie 20 minut odczytaj wynik na płytce testowej.
Po 30 minutach wynik nie jest już ważny.

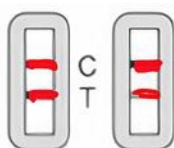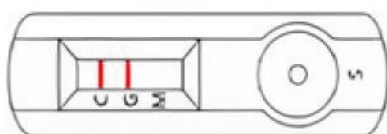

wynik
pozytywny

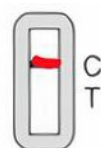

wynik
negatywny

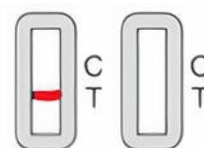

błąd

Tylko 4 przedmioty

Do przeprowadzenia testu na COVID-19 potrzebne są:



1. jałowy plastikowy patyczek z wacikiem do pobrania wymazu



2. probówka – buteleczka z rurką ekstrakcyjną do ekstrakcji antygenu



3. ekstrakt antygenowy R1



4. płytka testowa

Wszystkie wymienione elementy wchodzą w skład jednego zestawu testu na COVID-19. Zestawy sprzedawane są po 25 sztuk.

Ważne: Przeprowadzenie testu nie wymaga korzystania ze sprzętu ani otoczenia laboratoryjnego. Może go wykonać w dowolnym miejscu przeszkolony personel medyczny (pielęgniarka, ratownik medyczny, lekarz lub lekarz zakładowy), z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Wiedza i doświadczenie

Antygenowy test na COVID-19 jest produkowany przez doświadczonego specjalistę w zakresie testów przesiewowych – firmę API Pharma.

Posiadając dziesięcioletnie doświadczenie w aspekcie chorób zakaźnych, firma wykorzystwała swoją wiedzę do walki z COVID-19.

Firma produkuje ponad 200 rodzajów szybkich testów diagnostycznych, które są dostarczane na rynki międzynarodowe. Mogą one być wykonywane zarówno w warunkach ambulatoryjnych, jak i nie wymagających specjalistycznego sprzętu i otoczenia.

Szybkie testy przesiewowe są dokładne, łatwe do wykonania i niedrogie. Oferowane pacjentom, lekarzom, klinicyście oraz placówkom medycznym, jak również firmom produkcyjnym, których kadra zarządzająca dba o swój biznes oraz zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.



Zamów

Jeśli masz pytania czy wątpliwości – zapytaj:

Mobile SCANMED Systems sp. z o.o.

zaawansowana technologicznie firma oferująca
specjalistyczne produkty i usługi dla sektora medycznego

Marcin Weksler

marcin.weksler@mobilescanmed.pl

www.mobilescanmed.pl

tel. 512 354 354



Sprzedaż testów jest zgodna z wymogami prawnymi Polskiego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Są one przeznaczone do sprzedaży tylko i wyłącznie profesjonalnym użytkownikom.