



# Test MobiLab HPV 16/18/31

## KROK PO KROKU

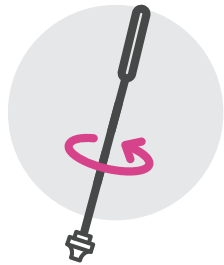


### KROK 1\*

Pobierz za pomocą wymazówki materiał komórkowy. Alternatywnie możesz użyć: pipetki, szczoteczki Rovers.

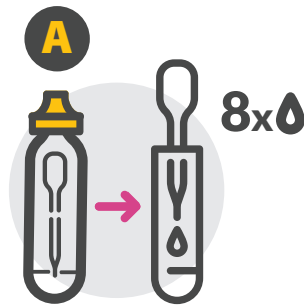


### KROK 2

Umieść czystą probówkę ekstrakcyjną w stacji roboczej. Dodaj 8 kropli buforu ekstrakcyjnego A.

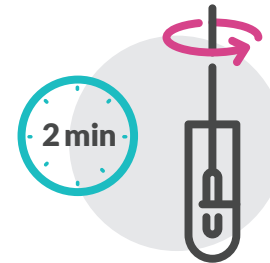


### KROK 3

Włóż próbkę z wymazem do probówki ekstrakcyjnej i odczekaj 2 minuty. Okrężnym ruchem przyciśnij wymazówkę do boków probówki, aby wydobyć jak największą ilość płynu.

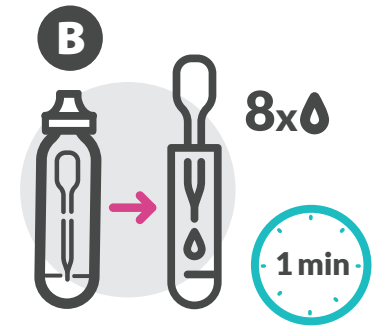


### KROK 3

Pod koniec czasu ekstrakcji do tej samej probówki dodaj 8 kropli buforu ekstrakcyjnego B i odczekaj kolejną 1 minutę. Przyciśnij wymazówkę do ścianki probówki, aby wydobyć z niej jak najwięcej płynu.

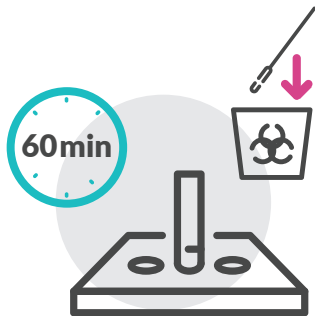


### KROK 5

Zutylizuj wymazówkę. Wyekstrahowana próbka może pozostać w temperaturze pokojowej przez 60 minut bez wpływu na wynik badania.

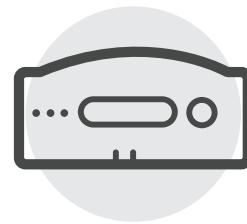


### KROK 6

Wyjmij kasetkę testową ze szczelnie zamkniętego opakowania i umieść ją na czystej i równej powierzchni. Oznacz kasetkę danymi pacjenta.

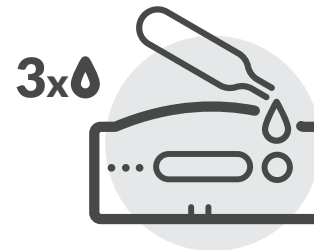

### KROK 7

Umieść 3 krople (około 100 µl) wyekstrahowanej próbki do okrągłej studzienki znajdującej się na kasecie testowej. Unikaj tworzenia się pęcherzyków powietrza w studzience (S) i nie upuszczaj roztworu do okienka obserwacyjnego.

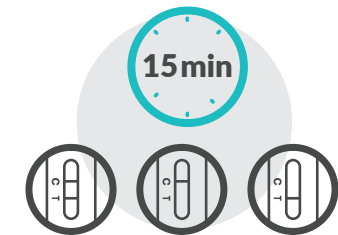

### KROK 8

Poczekaj na pojawienie się kolorowego pasma. Wynik powinien być odczytany w ciągu 15 minut. Nie należy interpretować wyniku po 20 minutach.

\* Jeśli natychmiastowe wykonanie testu nie jest możliwe, wymaz z szyjki macicy pacjentki należy umieścić w suchej probówce do przechowywania i transportu. Wymazy mogą być przechowywane do 72 godzin w temperaturze pokojowej (15-30°C) lub 7 dni w temperaturze 4°C. Przed wykonaniem badania powinny osiągnąć temperaturę pokojową 15-30°C.