




Mobile
SCANMED
Systems

Mobi Lab

Standard Sexual Health Self
Rapid Swab/ Urine Test

Test antygenowy STI 7w1

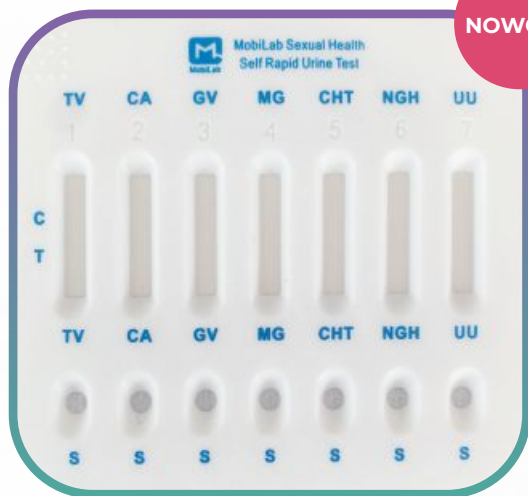

NOWOŚĆ

Ureaplasma
urealyticum

SEXUALLY
TRANSMITTED
INFECTIONS
7w1



Test antygenowy wykrywający zakażenia przenoszone drogą płciową (STI - sexually transmitted infection) - 7 w 1

MobiLab Standard Sexual Health Self Rapid Swab/Urine to łatwy do wykonania test kasetowy do szybkiego, jakościowego wykrycia antygenów infekcji przenoszonych drogą płciową (STI - sexually transmitted infection) zarówno u kobiet (swab), jak i u mężczyzn (urine).

Test jest rekomendowany do wykonania w każdym gabinecie ginekologicznym jako **standardowe badanie przesiewowe u kobiet, w którym materiałem do badania jest wymaz z pochwy**, posiadający wyższą czułość od próbki moczu.

Test antygenowy **STI 7 w 1** daje możliwość rozpoznania i różnicowania **siedmiu patogenów** infekcji przenoszonych drogą płciową.



Wymaz z pochwy w badaniu u kobiet

1. TRICHOMONAS VAGINALIS (TV)
2. CANDIDA ALBICANS (CA)
3. GARDNERELLA VAGINALIS (GV)
4. MYCOPLASMA GENITALIUM (MG)
5. CHLAMYDIA TRACHOMATIS (CHT)
6. NEISSERIA GONORRHOEAE (NGH)
7. UREAPLASMA UREALYTICUM (UU)

Ocena działania	Trichomonas vaginalis (TV)	Candida albicans (yeast)(CA)	Gardnerella vaginalis (GV)	Mycoplasma genitalium (MG)	Chlamydia trachomatis (CHT)	Neisseria gonorrhoeae (NGH)	Ureaplasma urealyticum (UU)
Czułość	100%	98.4%	98.46%	90%	87%	93%	97.73%
Swoistość	99%	95.1%	98.63%	88%	88%	90%	95.5%

Test jest przeznaczony do gabinetowego badania przesiewowego prowadzonego przez lekarza: ginekologa, urologa, wenerologa.

Elementy znajdujące się w zestawie:



Jak działa test?

Zasada działania testu polega na jakościowym wykryciu antygeny w wymazie z pochwy lub w próbce moczu (u mężczyzn) i wzrokowym odczycie wyniku na urządzeniu testującym - płytce testowej. Test MobiLab STI 7 w 1 należy do grupy testów szybkich. Wyniki uzyskujemy w 15 minut.



łatwy w wykonaniu



wynik w ciągu 15 minut



nieinwazyjny
i komfortowy dla
pacjentki



poszerza pakiet usług
wczesnej diagnostyki



nieдороga i opłacalna
procedura

Test MobiLab STI 7 w 1 (combo) to jakościowo i ekonomicznie uzasadniona procedura w codziennej praktyce ginekologicznej, urologicznej i wenerologicznej. Testy są zatwierdzone przez FDA, posiadają znak CE oraz zostały zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych w Polsce.



☺☺ Szybka diagnostyka jest warunkiem skutecznego leczenia. Test antygenowy firmy MobiLab daje możliwość rozpoznania i różnicowania siedmiu patogenów w dowolnym momencie w czasie wizyty u ginekologa lub urologa, bez kosztownych i długotrwałych badań PCR (chlamydia trachomatis, mycoplasma) przy braku mikroskopu (candida, trichomonas vaginalis, pałeczek gardnella i dwoinek rzeżączki). To bardzo przydatny test w codziennej praktyce. ☺☺

Dr n. med. Grzegorz Głąb

☺☺ Wdrożenie testów przesiewowych MobiLab STI 7 w 1 do rutynowej diagnostyki pozwala na wykluczenie chorób, o których kobiety, jak i mężczyźni woleliby nie myśleć, a tym bardziej nie pytać o nie lekarza.

Szybkość i sprawność wykonania tych testów znacznie poprawia komfort, zwłaszcza, że można je wykonać także w domu. Dla lekarzy testy te stanowią źródło informacji o stanie zdrowia swoich pacjentów. ☺☺

Lek. med. Jerzy Zygmunt



Mobile
SCANMED
Systems

Mobile SCANMED Systems

☎ +48 789 300 522

e-mail: office@mobilescanmed.pl

mobilescanmed.pl