


TEST MOBILAB STI 4w1

(badanie z pełnej krwi, osocza, surowicy)


KROK PO KROKU

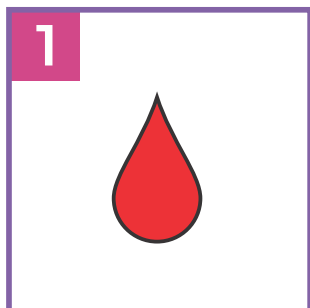

Pobierz próbkę krwi.



Wymij kasetkę testową ze szczelnie zamkniętego opakowania.

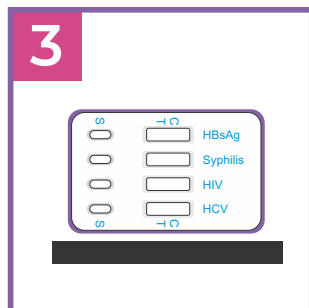

Umieść kasetkę na czystej i równej powierzchni.

4 Wykonaj test.


HBsAg (WZW B) - krew pełna



HBsAg (WZW B)

Próbka krwi pełnej:
Dodaj 2 krople próbki (około 60 μ L) do studzienki kasety testowej (S), a następnie dodaj 1 kroplę buforu (około 40 μ L).


HIV - krew pełna

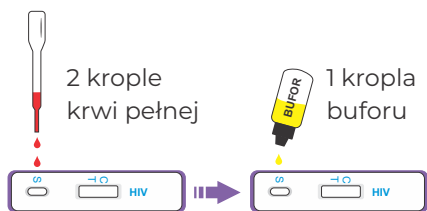

HIV

Próbka krwi pełnej:
Dodaj 2 krople próbki (około 60 μ L) do studzienki kasety testowej (S), a następnie dodaj 1 kroplę buforu (około 40 μ L).

HCV (WZW C) - krew pełna

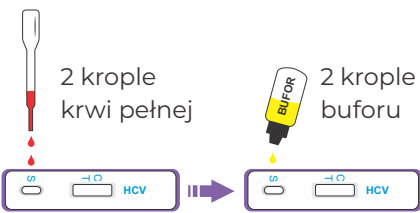


HCV (WZW C) - krew pełna

Próbka krwi pełnej:

Dodaj 2 krople krwi pełnej (około 60 μ L) do studzienki kasety testowej (S), a następnie dodaj 2 krople buforu (około 80 μ L).

HCV (WZW C)

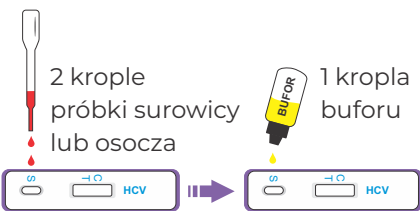

HCV (WZW C)

Próbka surowicy lub osocza:

Dodaj 2 krople surowicy lub osocza (około 60 μ L) do studzienki kasety testowej (S), a następnie dodaj 1 kroplę buforu (około 40 μ L).

TP (Kiła) - krew pełna




TP (Kiła) - krew pełna

Próbka krwi pełnej:

Dodaj 2 krople krwi pełnej (około 60 μ L) do studzienki kasety testowej (S), a następnie dodaj 1 kroplę buforu (około 40 μ L).

TP (Kiła)

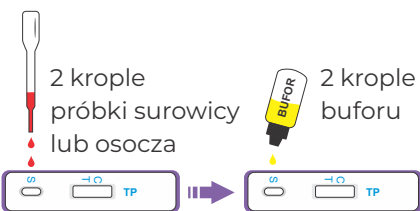

TP (Kiła)

Próbka surowicy lub osocza:

Dodaj 1 kroplę surowicy lub osocza (około 30 μ L) do studzienki kasety testowej (S) oraz dodaj 2 krople buforu (około 80 μ L).


5



wynik w ciągu 15 minut

Odmierz czas.

6

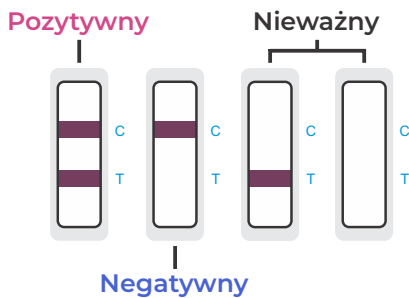

Odczytaj wynik testu.