



Mobile
SCANMED
Systems


Test z krwi



MobiLab

Standard Sexual Health
Self Rapid Blood Test

Test antygenowy STI 4w1

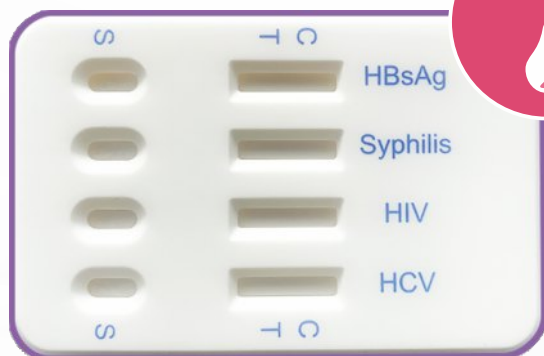

Test z krwi




SEXUALLY
TRANSMITTED
INFECTIONS
4w1



Test antygenowy wykrywający zakażenia przenoszone drogą płciową (STI - sexually transmitted infection) - 4 w 1

MobiLab Standard Sexual Health Self Rapid Blood to test immunologiczny przepływu boczego przeznaczony do jakościowego wykrywania antygenów: TP (wirusa kiły), HCV (wirusa zapalenia wątroby typu C), HBsAg (wirusa zapalenia wątroby typu B) oraz HIV-1/2 (wirusa niedoboru odporności typu 1 i 2) w ludzkiej krwi pełnej, surowicy i osoczu.

Test jest przeznaczony do badań przesiewowych jako wsparcie w diagnostyce. Każdy wynik dodatni testu MobiLab Standard Sexual Health Self Rapid Blood powinien zostać potwierdzony za pomocą alternatywnych metod testowania i badań klinicznych.

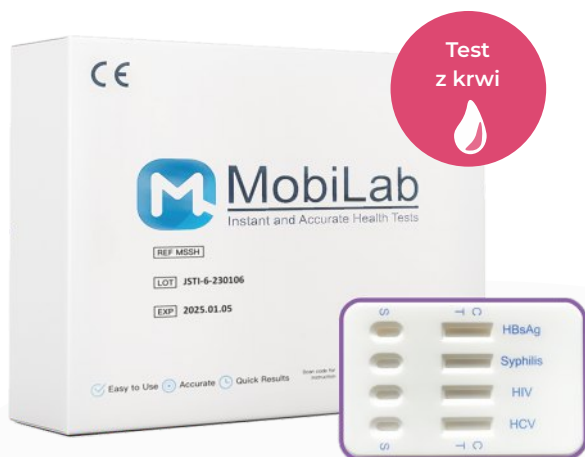

1. HIV (HIV 1/2)
2. TP (wirus kiły)
3. HCV (wirus WZW typu C)
4. HBsAg (wirus WZW typu B)

Ocena działania	HIV	TP	HCV	HBsAg
Czułość*	98.5%	96.8%	97.3%	98%
Specyficzność*	99.7%	99.8%	99.7%	99.5%
Dokładność	99.1%	98.3%	98.5%	98.8%
* względne				

Test jest przeznaczony do gabinetowego lub laboratoryjnego badania przesiewowego prowadzonego przez lekarza: ginekologa, urologa, wenerologa, internistę.

Elementy znajdujące się w zestawie:



1 test zawierający kasetę testową combo 4 w 1



1 roztwór buforowy



1 wkraplacz



1 ulotka w języku polskim

Jedno opakowanie kartonowe zawiera 25 kasetek testowych, z których każda jest osobno zapakowana w woreczku foliowym ze środkiem osuszającym.

Jak działa test?

Zasada działania testu polega na jakościowym wykryciu antygenu w próbce z krwi pełnej, osocza lub surowicy i wzrokowym odczycie wyniku na urządzeniu testującym - kasetce testowej. Test MobiLab STI 4 w 1 należy do grupy testów szybkich. Wynik uzyskujemy w ciągu 15 minut.



łatwy w wykonaniu



wynik w ciągu 15 minut



szybkie i skuteczne leczenie




poszerza pakiet usług wczesniej diagnostyki



niedroga i opłacalna procedura

Test MobiLab STI 4 w 1 jest przeznaczony do diagnostyki in vitro. To jakościowo i ekonomicznie uzasadniona procedura w codziennej praktyce ginekologicznej, urologicznej i wenerologicznej. Testy są zatwierdzone przez FDA, posiadają znak CE oraz zostały zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych w Polsce.

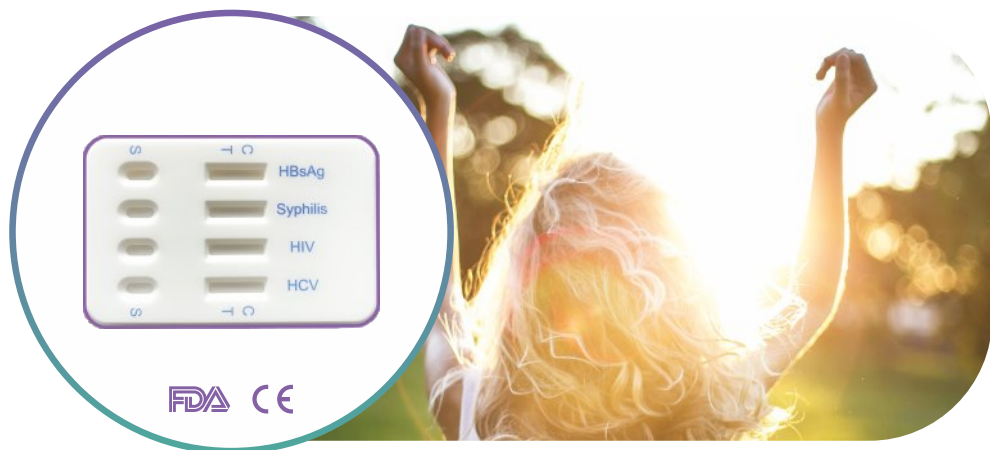

W 2023 roku zarejestrowano około 3 tysiące zachorowań na kiłę - to blisko o 50% więcej niż rok wcześniej. Natomiast przypadków rzeżączki wykryto ponad 1370 - to ponad dwukrotny wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem. Profesor Miłozz Parczewski, konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych przynajmniej, że najnowsze dane dotyczące zarejestrowanych przypadków zachorowań są alarmujące: „Chorób przenoszonych drogą płciową - kiły i rzeżączki - mamy istotnie więcej i ten trend jest wzrostowy. Testujemy późno, testujemy osoby objawowe”. Według profesora

rzeczywistych przypadków kiły i rzeżączki może być znacznie więcej. „To co się zaczęło pojawiać w Polsce, znaczy, że kiły jest dużo więcej, bo ona krąży i powoduje zakażenia, których my nie jesteśmy w stanie dodiagnozować. Pojawiają się również pojedyncze przypadki kiły wrodzonej.

W krajach Europy Zachodniej wzrost zachorowań na choroby weneryczne jest obserwowany od 10 lat. Ale tam został zorganizowany dobry system wykrywania nowych zakażeń.



**Mobile
SCANMED
Systems**

Mobile SCANMED Systems

+48 789 300 522

e-mail: office@mobilescanmed.pl

mobilescanmed.pl