


E7 Protein Test


materiał do badania: wymaz z tarczy i kanału szyjki macicy razem ze śluzem

KROK PO KROKU

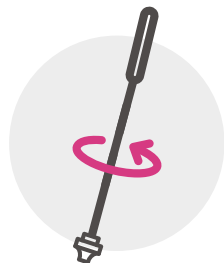


KROK 1

Pobierz za pomocą sterylnej wymazówki materiał komórkowy z tarczy i kanału szyjki macicy razem ze śluzem.

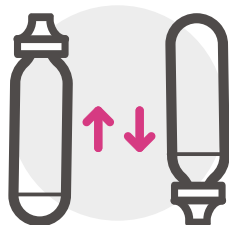


KROK 2

Obróć kilka razy: góra-dół buteleczkę z roztworem buforowym przed otwarciem.

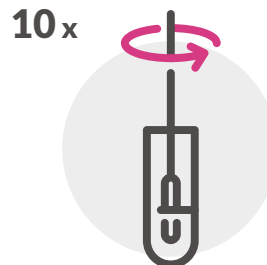


KROK 3

Włóż wymazówkę z pobranym materiałem do buteleczki i obracaj nią 10 razy, przyciskając mocno do boków probówki. Wyjmij wymazówkę.

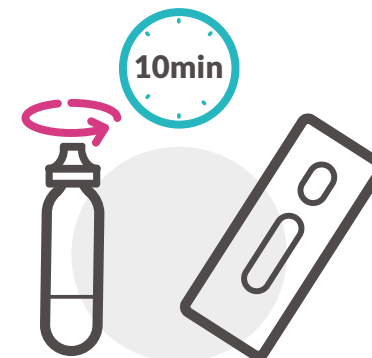


KROK 4

Buteleczkę zakręć i odstaw na 10 minut, aby roztwór się ustabilizował. Wyjmij kasetkę testową i ułóż na płaskiej powierzchni.

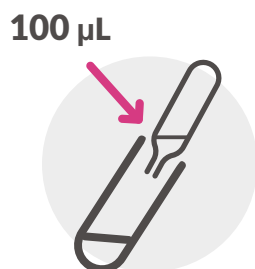


KROK 5

Pobierz pipetką ok. 100 µL wyekstrahowanej próbki.

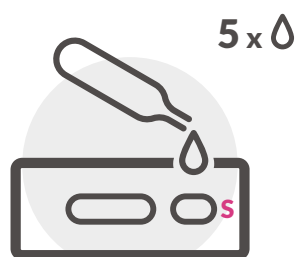


KROK 6

Umieść 5 kropli w okrągłym okienku oznaczonym literą „S” na kasetce testowej.

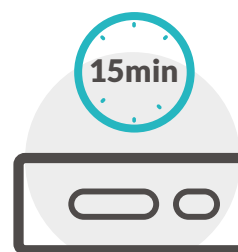

KROK 7

Odczekaj 15 minut.

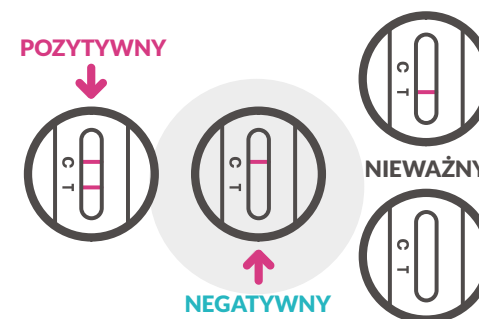

KROK 8

Odczytaj wynik testu.

WYKLUCZENIA: 3 dni przed wykonaniem testu pacjentka powinna zrezygnować z seksu oraz ograniczyć zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne okolicy narządów płciowych (depilacja) | 3 dni przed pobraniem pacjentka nie może stosować leków dopochwowych i maści zewnętrznych | testu nie wykonuje się u pacjentek w czasie menstruacji oraz ciąży | nie należy pobierać wymazu 3 dni przed i 3 dni po miesiączce | jeżeli występuje nieprawidłowe lub obfite krwawienie z pochwy lub nadmierna i gęsta wydzielina, pobranie próbki należy odłożyć na później | należy zachować 1 dzień przerwy po badaniu ginekologicznym czy USG ginekologicznym

* Jeśli natychmiastowe wykonanie testu nie jest możliwe, wymaz z szyjki macicy pacjentki należy umieścić w suchej probówce do przechowywania i transportu. Wymazy mogą być przechowywane do 72 godzin w temperaturze pokojowej (15-30°C) lub 7 dni w temperaturze 4°C. Przed wykonaniem badania powinny osiągnąć temperaturę pokojową 15-30°C.